




MEDICOM SAFE-SEAL DUET SELVTETTENDE STERILISERINGSPOSER MED INNVENDIGE OG UTVENDIGE INDIKATORER


Elementkoder: 88000,88005,88010,88015,88025,88030,88040

Selvtettende steriliseringsposer med innvendige og utvendige indikatorer er laget for bruk i damp- og etylenoksid (EO)-steriliseringssystemer.


Bruksanvisning:

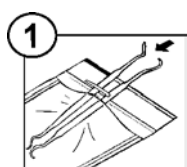

Legg gjenstanden i posen.

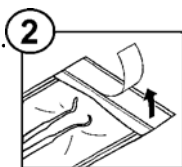

Fjern beskyttelsesfilmen fra klebebåndet.

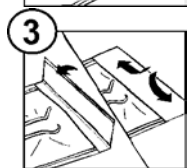


Brett papirfliken langs bretten, og trykk bestemt sammen fra midten og utover.


Fargekoder for prosessindikatorer



Steam Sterilization

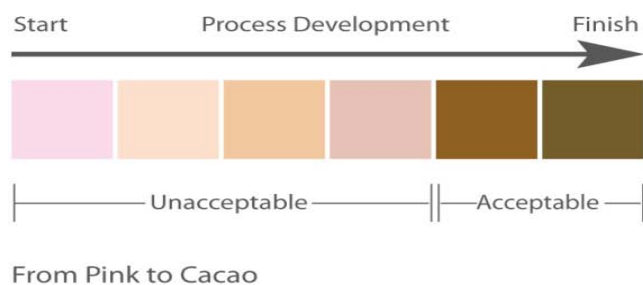

EO Sterilization

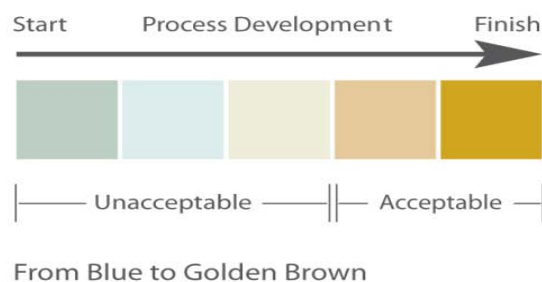

De relevante indikatorene skifter farge når de blir behandlet i damp eller etylenoksid.

Feilsøking

Hvis indikatorene ikke skifter farge, kontrollerer du følgende:

- Kontroller autoklavens temperatur gjennom driftssyklusen.
- Overflødig fuktighet kan kontrolleres ved å se etter vannflekker, krøller og blekk som renner utover på posene når de fjernes fra steriliseringsenheten.
- Hvis det er nødvendig å stable flere poser i hver syklus, anbefales det å stable dem løst.