

■ Brukerveiledning for R-Brush

- **Formål:** R-Brush er et instrument som brukes ved behandling av periimplantitt

- **Forholdsregler ved bruk**

1. Denne medisinske enheten er til engangsbruk, derfor er gjenbruk forbudt.
2. Dette produktet er et sterilt medisinsk verktøy. Hvis produktet og/eller pakningen er skadet må du kaste produktet.
3. Det er forbudt å bruke dette produktet til andre formål enn det det er ment til.
4. Når du utfører et gingivalt ikke-kirurgisk inngrep, bør gingiva være fullstendig åpent med explorer, curette eller periotome.
5. Bruk normal saltoppløsning.
6. Hvis produktet roterer overdrevent, kan tuppen brette av. Se etter løse tupper etter bruk, og fjern tupper som har brukket av i munnen.
7. Brukeren skal være fullstendig informert om prosedyrer for bruk og ta nødvendige forholdsregler før bruk av produktet.
8. Dette produktet skal kun brukes i behandling av én pasient og ett feste. Overdreven bruk kan resultere i akkumulert slitasje av tuppene.

- **Forberedelse før bruk**

- A. Dette produktet er et sterilt medisinsk instrument:
- Kontroller pakningens tilstand og produktets utløpsdato.
 - Produkter skal ikke brukes hvis forseglingen er skadet eller brutt.
- B. Velg riktig produktstørrelse
- C. Sjekk om produktet har riper eller skader.

- **Slik bruker du produktet**

- A. Sett lokalbedøvelse.
- B. Fjern protesen og distansene.
- C. Stram R-Brush-hetten til implantatfestet for å unngå at R-Brush trenger inn i skruhullet – det kan resultere i avbruttet tupp. Stram R-Brush-hetten som følgende:

① Ved å bruke distanseskruen på den fjernede protesen kan du føre den over hetten [bilde 1] som vist på [bilde 2].

(Bilde 1) (Bilde 2)



② CAP25 (stor størrelse) brukes for brede skruefester som Brånemark External Wide Type. CAP20 (liten størrelse) kan brukes til alle andre interne, eksterne eller retinerte fester (standard, bred)

③ R-Brush-hetten plasseres på distanseskruen som brukes til protesen.

④ Fest distanseskruen med R-Brush-hetten til festet, som vist på [bilde 3]. Stram nå helt til 3 ~ 5 Ncm.

[Bilde 3]



D. Fjern betent bløtvev etter gingivalt snitt.

E. Roter kirurgimotoren 2000 til 5000 rpm, drei mindre enn 5 Ncm (rotasjonshastighet og dreiemoment), beveg langsomt opp og ned, til venstre og høyre langs implantatoverflaten og tørk av. Det bør nå utvises forsiktighet, slik at den runde børsten ikke er i kontakt med distanseskruen. Det anbefales å vaske den runde børsten i ett minutt per tråd. Kontroller rengjøringen av implantatoverflaten med et forstørrelsesglass (forstørret 2,5 ganger eller mer) og rengjør som nødvendig. Bruk 0,2 % klorheksidin eller saltvann. Det brukes én enkel R-Brush på hvert feste.

F. Du kan fjerne bakterierester på implantatoverflaten, som er behandlet med rund børste, med sitronsyre som Tetracyclin i ca. fem minutter, og i tillegg kan du bruke andre metoder som laser.

G. Utfør om nødvendig GBR (benregenerasjon) og/eller sutur.

● Etter bruk

Denne medisinske enheten er til engangsbruk, derfor er gjenbruk forbudt.

● **Lagring:** Lagres i romtemperatur, unngå direkte sollys og fuktighet.

● **Holdbarhet:** Fem år fra produksjonsdatoen

● **Distributør:** Neobiotech Europe B.V.

- Adresse: Rotterdam Science Tower (18. etasje) Marconistraat 16, 3029 AK, Rotterdam, Nederland

- Tlf: +31 (0) 10 850 76 97

- e-post: info@neobiotech.eu

- nettsted: www.neobiotech.eu

Redigert: 22. november 2017 (Rev. E-1)