

NORSK

1 - PRESENTASJON

AIRnGO "CLASSIC" og **AIRnGO "PEARL"** pussepulver er utviklet spesifikt for supragingival profylaktisk behandling. Disse pulvertypene kan brukes med alle luftpusserne fra SATELECR.

AIRnGO "CLASSIC" pulver: Naturlig smak tilgjengelig som alternativ: peppermynte, sitron, jordbær, cola eller nøytral.

AIRnGO "PEARL" pulver: Nøytral pakning med **AIRnGO** pulver:

- 20 g dosepakninger for engangsbruk – Esker med 50 poser.
- 250 g flerdoseflaske med helletut.

2 – INDIKASJONER

- Fjerning av plakk, (tannregulering eller før bleking), flekkfjerning. Fjerning av midlertidige sementrester.
- Pussing av tenner etter fjerning av tannstein.
- Inter-proksimal rensing, rensing av fissurer og fordypninger.
- Rengjøring av bånd og braketter i munnen.
- Rengjøring og klargjøring av tannoverflaten før etsing.

3 - EGENSKAPER

De slipende egenskapene til **AIRnGO**-pulveret skader ikke emaljen eller tannkjøttet.

AIRnGO "CLASSIC": Er smertefri og forårsaker ikke sterk blødning, og er egnet for supra-gingival vedlikeholdsbehandling. Tilgjengelig i forskjellige smaksvarianter som gir en frisk følelse i munnen.

AIRnGO "PEARL": Uten natrium-bikarbonat. Pulveret består av mikroperler med identisk størrelse. Gjør det mulig å utføre ekstremt aktiv pussing som er svært effektiv og smertefri for pasienten. Egnet for pasienter som er på diett med lavt saltinnhold.

4 – SAMMENSETNING

AIRnGO "CLASSIC" pulver: Natrium-bikarbonat, hydrofobisk silika, natrium-sakkarinat, eksipienter, naturlige essensoljer eller smaksstoffer.

AIRnGO "PEARL" pulver: Kalsiumkarbonat.

5 - FORHOLDSREGLER VED BRUK

Før pulveret brukes, anbefaler vi at du fastslår pasientens generelle helsetilstand.

- Følg bruksvilkårene som anbefales av produsenten av luftpusseren.
- Pasienten og tannpleieren bør bruke egnet verneutstyr (briller, masker).
- Unngå å rette strålen direkte mot tannkjøttet.
- Pasienten må skylle munnen med en antiseptisk oppløsning før og etter behandling.
- Smør VaselineR på leppene før pussing.
- Bruk en stor aspirator og hold den nær området som behandles (for å redusere kontaminering av luftbårne bakterier).
- Skyll grundig med vann ved utilsiktet kontakt med huden eller øynene.
- Må ikke svelges.

6 – MULIGE BIVIRKNINGER

- Kjent allergi mot noen av komponentene.

- Pasienter som lider av endokarditt.
- Pasienter med nedsatt immunforsvar.
- Pasienter som bruker antibiotika, er under behandling med kjemoterapi, strålebehandling osv.
- Pasienter på diett med lavt saltinnhold.
- Diabetikere, astmatikere eller pasienter som lider av åndedrettsproblemer.
- Blødere.
- Gravide kvinner eller ammende mødre.

7 – BRUKSANVISNING

Følg bruksanvisningen som fulgte med luftpusseren. Generelt:

- Hold en "strålevinkel" på mellom 45° og 60°.
- Hold en avstand til "sprøyteflaten" på ca. 6 mm.
- Bruk små sirkelbevegelser på tannen.
- Rett strålen mot bittflaten.

8 - OPPBEVARING

Må ikke brukes etter utløpsdatoen på den utvendige emballasjen. Lukk flasken skikkelig etter bruk (bruk innholdet raskt etter åpning). Posene med engangsdoser kastes etter bruk. Oppbevares ved romtemperatur (< 25 °C) beskyttet mot fuktighet og lys.

9 – KASSERING AV UBRUKT PULVER

Må ikke kastes i avløp eller vannveier.

Må ikke kastes som husholdningsavfall.

Forsiktig: Føderale lover i USA begrenser bruken av dette utstyret utelukkende til kvalifiserte personer.